




- ① 外包装ホイルパウチを開封し、内側のタイベックパウチから製品トレイを取り出す

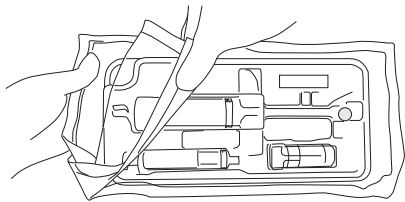

- ② プラスチックトレイ角の指かけ穴から蓋を持ち上げ、外す

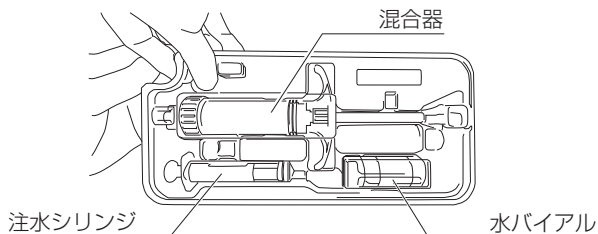


- ③ 混合器のルアーキャップを外し、ハンドル部分を引けるところまで引く

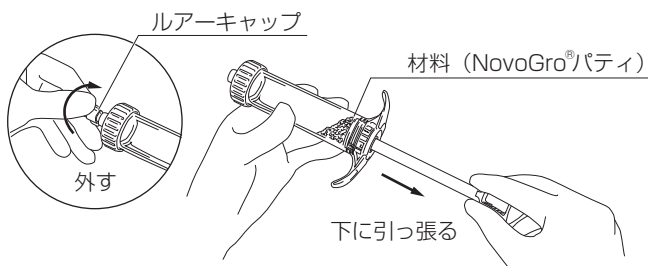


- ④ ハンドルのストッパーを外す




- ⑤ 混合のための適切な水の量を測り取る

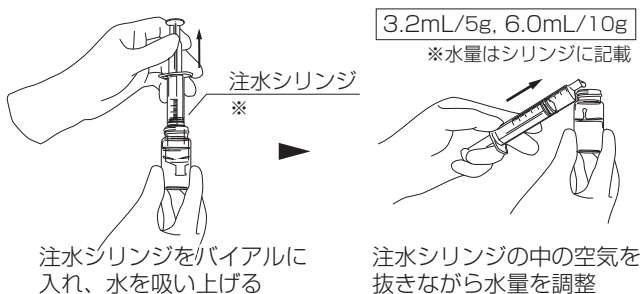

- ⑥ 注水シリンジを混合器に合体させ、水の中に入れる

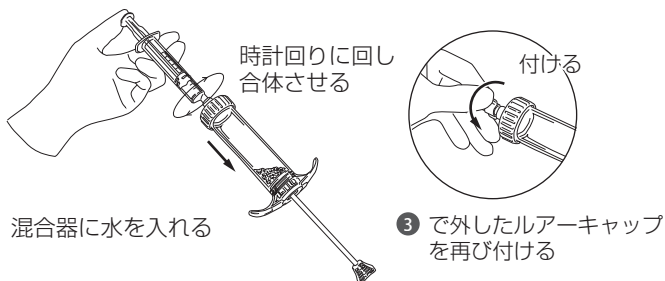

- ⑦ ハンドル部分を上下各方向に回しながら、先端部のブレードで材料と水を混練する

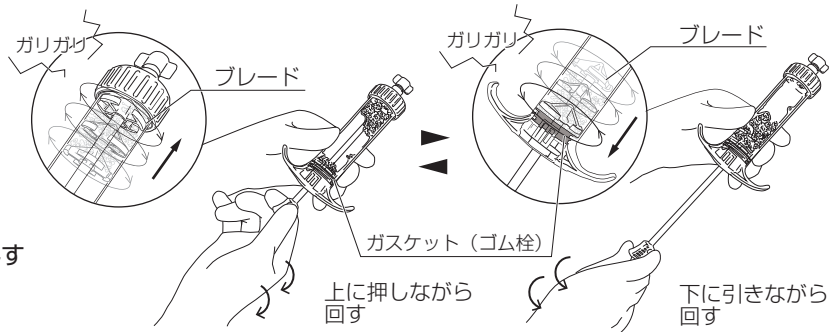


ブレードで材料を上側に軽く寄せ、そのまま上に突き当たるまで複数回に分けて回し、材料と水を混練


反対側も同様に 下側に材料を寄せ、そのままゴム栓までブレードをかき回し、材料と水を均一に混ぜ合わせる

5g : 約 7 ~ 10 往復 / 10g : 約 10 ~ 15 往復


- ⑧ ハンドルを下まで引き、ストッパーを取り付ける

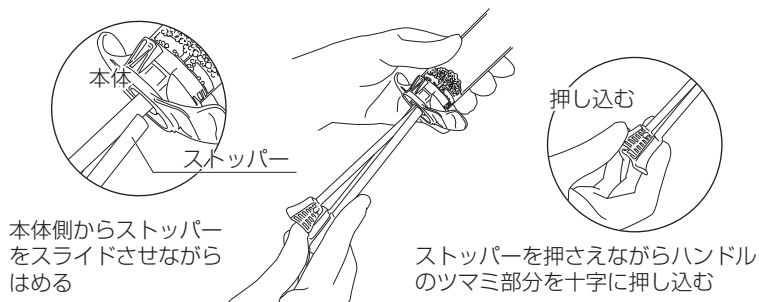

- ⑨ 混合器の蓋を少し緩め、ハンドルを押し上げて、パティを上蓋面に押し固める

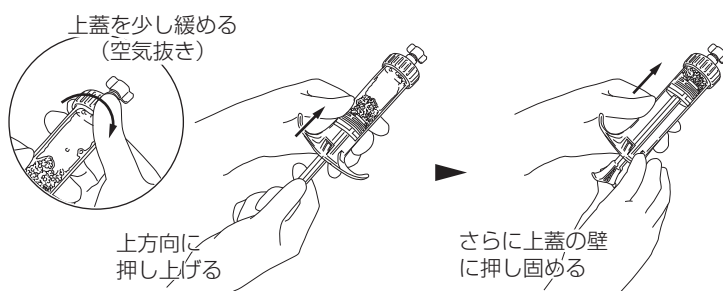

- ⑩ 混合器の蓋を外し、ハンドルを完全に押し出す

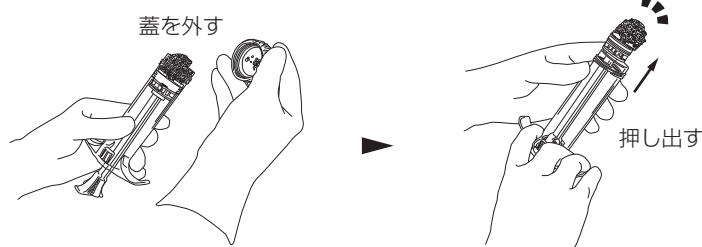

- ⑪ 先端からパティを取り出し、ひとまとめにする



※ NovoGro<sup>®</sup>パティを練りすぎない  
取り出し後にパティを練りすぎると、  
顆粒が手袋に付着しやすくなるなど、  
使い勝手が悪くなります。